

MEYRA GmbH
Postfach 12 10
32586 Vlotho
Tel. 0 57 33 / 9 22 - 0
Fax 0 57 33 / 9 22 - 143
www.meyra.de
info@meyra.de

Reinigungs- und Pflegehinweise

Alle MEYRA Polsterteile und Bezugstoffe sind mit einem Label mit Wasch- und Pflegehinweisen ausgestattet. Bitte beachten Sie diese Hinweise bei der Reinigung Ihres Produktes.

Symbolik

Symbol	Erklärung
	Sehr schonendes Waschen bei 30 Grad. Fein- oder Wollwaschgang Very gentle washing at 30 degrees. Fine or wool wash
	Waschen in der Waschmaschine bei 60 Grad Washing machine at 60 degrees
	Nicht im Trockner trocknen Do not tumble dry
	Nicht bügeln Do not iron
	Nicht bleichen Do not bleach
	Keine chemische Reinigung No chemical cleaning
	Europäische Konformität European Conformity

Reinigung und Desinfektion

Vor dem Reinigen und Desinfizieren des Rollstuhles muss loser Grobschmutz, wie z.B. Lebensmittelrückstände, Haare im Bereich der Lenkrollen oder starke Verschmutzung entfernt werden, bevor die Reinigerlösung aufgetragen wird. Vor dem Desinfizieren muss die Reinigerlösung nach Herstellerempfehlung abgespült werden. Das Desinfektionsmittel wird aufgesprüht oder über Wischtechnik aufgetragen und je nach Herstellerempfehlung ggf. abgespült.

Reinigungslösungen

Es sind pH-neutrale Reinigungsmittel (pH 7) empfohlen. Saure Reiniger (pH 1-6) bzw. alkalische Reiniger (pH 8-14) können Kunststoffteile, Oberflächenbeschichtungen oder Klebeverbindungen angreifen.

Desinfektionsmittel

RKI und VAH gelistete Desinfektionsmittel sind zugelassen.

Es sind pH-neutrale Desinfektionsmittel (pH 7) empfohlen. Saure Desinfektionsmittel (pH 1-6) bzw. alkalische Desinfektionsmittel (pH 8-14) können Kunststoffteile, Oberflächenbeschichtungen oder Klebeverbindungen angreifen.

Bezugsteile

Die Bezüge für Sitzgurte, Rückengurte und Sitzkissen sollten im Schonwaschgang bei 30° gewaschen werden. Bei höheren Waschttemperaturen können die Bezugsstoffe schrumpfen. Innen liegende Schaumteile bitte, wenn möglich, vorher entnehmen, da auch diese durch den Waschgang schrumpfen können. Bei den Schaumteilen empfiehlt sich eine Tauchreinigung bzw. Tauchdesinfektion. Beschädigte Polsterteile müssen ausgetauscht werden. Haftbänder (bei Klettverbindungen) müssen abgedeckt werden, um Oberflächenschäden zu vermeiden. Ist es nicht möglich, die Haftbänder abzudecken, wird eine Handwäsche empfohlen.

Für einzelne Produkte können die Pflegehinweise abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Produktes.